

PROTOCOL – VERPLEEGTECHNISCHE HANDELING

A

**Urinekweek (Dipslide)**

G

VOORBEREIDING

ja/ nee

1	Sieraden van handen en polsen verwijderd, kapsel en kleding correct.		
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfecteren).		
3	Benodigdheden: niet steriele handschoenen, dipslide, tissue, eventueel een broedstoof.		
4	Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zo nodig toestemming) Vertel door wie en wanneer de uitslag wordt gegeven. Patiënt is niet bij het onderzoek.		

UITVOERING

5	Trek niet steriele handschoenen aan.		
6	Zwenk/ homogeniseer het urinepotje enkele keren.		
7	Doop de voedingsbodem onder in de urine of giet het er overheen. Laat bovenaan een stukje vrij zodat bij het aflezen het verschil goed te zien is.		
8	Sluit de dipslide en plak de sticker met persoonsgegevens op het buisje. Zet hierop ook de datum en tijd van inzet.		
9	Plaats de dipslide rechtop en maak bij voorkeur gebruik van de broedstoof (35-38°)		
10	Beoordeel na verloop van 18 uur (bij 35-38°) of 24 uur (bij 20°) de rode voedingsbodem tegen reflecterend licht op de aanwezigheid van koloniën en of deze van gelijke grootte zijn.		
11	Vergelijk de groene voedingsbodem tegen reflecterend licht met het afleeskaartje en lees de concentratie af.		

NAZORG

12	Ruim de materialen op de juiste wijze op.		
13	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/ of desinfecteren).		
14	Noteer het verloop en de gegevens in het HIS.		

ALGEMEEN

15	Werk hygiënisch.		
16	Werk methodisch.		

Bron:

BSL Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten 2015 ISBN 9789036809191 (elektronisch)