

PROTOCOL - LABORATORIUMWERK		A
	CRP bepaling	G

VOORBEREIDING

ja/ nee

1	Sieraden van handen en polsen verwijderd, kapsel en kleding correct.		
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfecteren).		
3	Benodigheden: , 2 bekkens, tissue, prikpen, naaldencontainer, niet steriele handschoenen, deppers/ pleisters, CRP-apparaat, capillair/ cuvet, plunjers, CRP buisjes, CRP reagens capsule.		
4	Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zo nodig toestemming) Vertel door wie en wanneer de uitslag wordt gegeven.		

UITVOERING

5	Zet het CRP apparaat aan.		
6	Kies meten in het hoofdscherm en volg de instructies op het scherm.		
7	Haal het zilverpapier van het buisje af.		
8	Prik de patiënt volgens prikbeplating (protocol).		
9	Vul de capillair tot aan de witte streep.		
10	Plaats capillair in CRP buisje.		
11	Druk met de plunjer bloed naar beneden in het buisje.		
12	Let op: buis NIET schudden.		
13	Sluit het buisje af met reagens capsule.		
14	Let op: druk NIET op de blauwe knop.		
15	Plaats het buisje boven het CRP- apparaat.		
16	Het apparaat gaat meten.		

NAZORG

17	Ruim de materialen op de juiste manier op.		
18	Zet het CRP- apparaat uit (knop 2 sec. vasthouden).		
19	Handhygiëne is correct.		
20	Noteer het verloop en de gegevens in het HIS.		

ALGEMEEN

21	Werk hygiënisch.		
22	Werk methodisch.		

Bron:

BSL Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten 2015 ISBN 9789036809191 (elektronisch)