

Steriliseren

- Na sterilisatie geen levende micro-organismen meer aanwezig op het instrument
- Sterilisatie is nodig voor alle instrumenten die in contact komen met: beschadigde huid, beschadigd slijmvlies of steriele lichaamsholten
- **Basisregel!!!! Vooraf altijd huishoudelijk reinigen!!**
- In huisartsenpraktijk hete lucht steriliseren
- Steriliseren duurt lang, 120 minuten op 160 graden

Autoclaaf

- Stoomsterilisator
- Met laminaatzakjes (zie voorbeeld)
- Zakjes (strip aan achterkant) verkleuren als het proces klaar is)
- Max 75% gevuld

Steriliseren in Ziekenhuis

- Gaat via CSA → centrale Sterilisatie Afdeling alles wordt kant en klaar afgeleverd

Figuur 1 sterilisatie mandje ziekenhuis

